



Schnelldesinfektion von Oberflächen

IHO

PROFESSIONAL@home SCHNELLDDESINFEKTION

- Wirksam gegen Coronaviren ab 30 Sekunden
- Wirksam gegen Noroviren
- Gute Material- und Hautverträglichkeit
- parfümfrei



Produktbeschreibung

PROFESSIONAL@home SCHNELLDDESINFEKTION ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere für die Küche und den Haushalt geeignet. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf und hinterlässt keine Streifen und sichtbare Rückstände. Eine ausgezeichnete Ergänzung bilden die PROFESSIONAL@home Desinfektionstücher zur allgemeinen Desinfektion von Flächen, Händen und Haut.

Anwendungsgebiete

GEM. BIOZIDPRODUKTE-VERORDNUNG (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, auch im Bereich von Küche und Haushalt.

GEM. EU-MEDIZINPRODUKTE VERORDNUNG:

Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Auch geeignet zur Anwendung auf Fieberthermometern und Massagegeräten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ZUR FLÄCHENDESINFEKTION:

wirksam gegen Coronaviren (begrenzt viruzid):	30 s
wirksam gegen Vacciniaviren:	30 s
wirksam gegen Rotaviren:	30 s
wirksam gegen Adenoviren:	3 min
wirksam gegen Noroviren (MNV):	30 s
Bakterizid, levurozid:	1 min
tuberkulozid (M. terrae):	30 s
mykobakterizid (M.avium):	1 min
begrenzt viruzid:	30 s
begrenzt viruzid PLUS:	3 min

Anwendungshinweise

PROFESSIONAL@home SCHNELLDDESINFEKTION kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

BAuA Reg. Nr. N-94529

CE 0482

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

P +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.com





Schnelldesinfektion von Oberflächen

PROFESSIONAL@HOME SCHNELLEDESINFEKTION

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
PROFESSIONAL@home SCHNELLEDESINFEKTION	Rundflasche	100 ml	30	01-323DS-001	16893307
	Sprühflasche	250 ml	20	01-323DS-0025	16812616
	Triggerflasche	750 ml	6	01-323DS-0075	16893336

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

